



INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU KRWI NA BADANIE KARIOTYPU

ZASADA POBRANIA KRWI

Materiał na badanie kariotypu (krew obwodowa) powinien być pobierany w Punkcie Pobrań przez uprawnione osoby.

Należy zastosować ogólnie przyjęte procedury pobierania krwi stosowane w Punktach Pobrań.

1. Pacjent musi być po posiłku.
 2. Pacjent nie może zażywać silnych antybiotyków i cytostatyków ani mieć przetoczeń krwi przez co najmniej 6 miesięcy (jeżeli tak - należy poinformować o tym Pracownię Cytogenetyczną).
 3. Pobrać należy ok. 5 ml krwi obwodowej do jałowej haparynizowanej probówki (najlepiej z pomarańczowym korkiem firma Sarstedt).
 4. Delikatnie wymieszać zawartość probówki i opisać (imię, nazwisko, data urodzenia/PESEL pacjenta).
 5. Do pobierania krwi mogą również być wykorzystywane ogólnie dostępne probówko-strzykawki z heparyną litową.
 6. W razie konieczności pobraną próbkę krwi można przechować w temp. **6-10°C** i w ciągu 24 godzin i przesłać do Laboratorium EUROIMMUN DNA.
- Uwaga !** Krwi nie można zamrażać.
7. Probówki przeznaczone do transportu należy zabezpieczyć np. zapakować do pojemników steropianowych lub nieprzemakalnych woreczków foliowych.
 8. Do pobranej próbki należy dołączyć wypełniony formularz zlecenia na badanie cytogenetyczne z krwi obwodowej.
 9. Przygotowaną przesyłkę wysłać za pośrednictwem firmy przewozowej (kurier) do Laboratorium EUROIMMUN DNA.
 10. Termin realizacji badania wynosi do 25 dni od dnia dostarczenia materiału do Laboratorium EUROIMMUN DNA.