


Jak wygląda autotest?

Szczoteczka Evalyn®Brush ma długość około 20 cm i składa się z przezroczystej obudowy ze skrzydełkami. Wewnątrz obudowy znajduje się różowy pręcik z różowym uchwytem na jednym końcu i białą szczoteczką na drugim.

Na koniec ze szczoteczką można nałożyć na obudowę różową nasadkę. Po zdjęciu nasadki można wypchnąć białą szczoteczkę z obudowy, dociskając różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy.

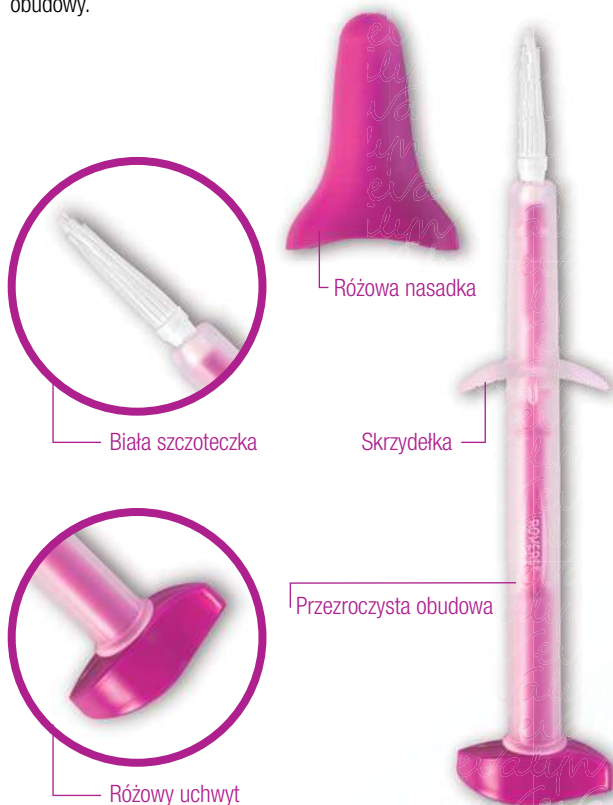

Dlaczego używać szczoteczki Evalyn®Brush?

Szczoteczka Evalyn®Brush została stworzona specjalnie z myślą o pobieraniu materiału komórkowego z pochwy. Szczoteczka Evalyn®Brush posiada delikatne włoski, co umożliwia zebranie każdorazowo odpowiedniej ilości materiału komórkowego.

Rovers Medical Devices

Firma Rovers Medical Devices specjalizuje się w produkcji urządzeń do pobierania próbek komórkowych do badań medycznych. Bezpieczeństwo i niezawodność naszych produktów są oparte na wieloletnim doświadczeniu firmy Rovers Medical Devices w zakresie opracowywania, wdrażania i produkcji szerokiej gamy produktów do badań medycznych. Szczoteczka Rovers® Cervex Brush® – znana na całym świecie dzięki swej innowacyjnej wymazówce – stanowi część oferty firmy Rovers Medical Devices.

evalyn®brush

Instrukcja przeprowadzania testu domowego

Wersja Evafid 2014-04-PL



Producent: Rovers Medical Devices BV
Lekstraat 10, 5347 KV Oss, Holandia
Tel.: +31 412 648870
Faks.: +31 412 623835
E-mail: info@roversmedicaldevices.com
Witryna internetowa: www.roversmedicaldevices.com



Szczoteczka Rovers® Evalyn® to produkt chroniony patentem o zarejestrowanym wzorze.
Rovers® i Evalyn® to zarejestrowane znaki handlowe Rovers Medical Devices B.V. Oss, Holandia.
© Rovers Medical Devices B.V.

CE 0044

STERILE EO



Szczoteczka Evalyn®Brush

Szczoteczka Evalyn®Brush to urządzenie sterylne, umożliwiające przeprowadzenie testu w warunkach domowych. Za pomocą szczoteczki Evalyn®Brush można łatwo i bezboleśnie pobierać materiał komórkowy z pochwy. Ten materiał może zostać później poddany analizie w profesjonalnym laboratorium.

Ważne uwagi


- Nie używać, jeśli opakowanie szczoteczki Evalyn®Brush jest uszkodzone ani po upływie terminu przydatności.
- Nie używać podczas menstruacji.
- Nie używać w ciąży ani przez trzy miesiące po zakończeniu ciąży.
- Nie używać żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed użyciem szczoteczki Evalyn®Brush. Można normalnie używać dopochwowych środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków nawilżających na bazie wody.
- Wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Ponowne użycie może skutkować zakażeniem lub nieprawidłową diagnozą.
- Należy sprawdzić, czy numery identyfikacyjne na opakowaniu szczoteczki Evalyn®Brush i na formularzu dot. wyrażenia zgody są zgodne.
- Należy zapisać swoje imię i nazwisko oraz datę na dołączonej naklejce identyfikacyjnej i przykleić ją do przezroczystej obudowy szczoteczki Evalyn®Brush.

Prosta, bezpieczna i niezawodna


Poniższe instrukcje dotyczą używania szczoteczki Evalyn®Brush.




1. Przed użyciem umyj ręce.

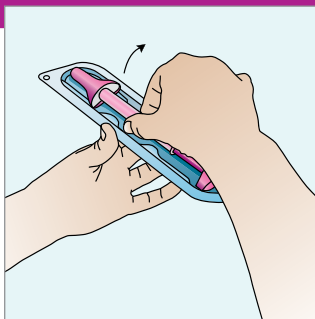


2. Wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki Evalyn®Brush do laboratorium po użyciu.

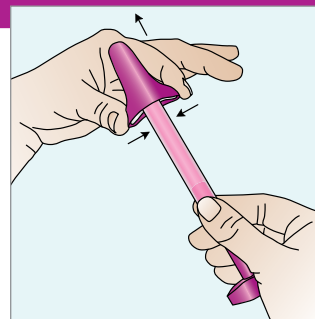


3. Ściśnij boki różowej nasadki za pomocą kciuka i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki Evalyn®Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki Evalyn®Brush!

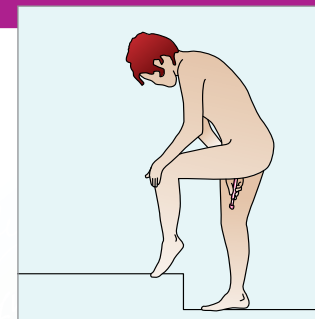


4. Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij sobie wygodne podparcie (takie jak np. do wkładania tamponu).

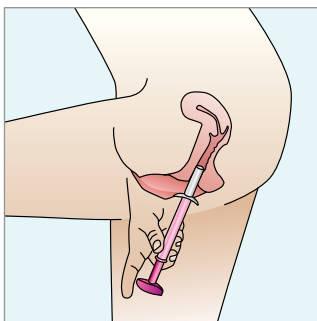


5. Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczkę Evalyn®Brush do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

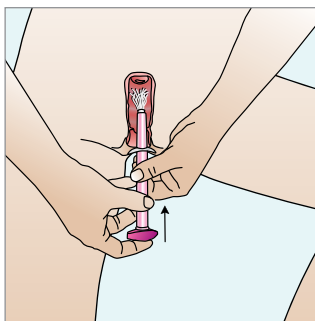


6. Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą dociśnij różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu z różowym uchwytem przy obudowie, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

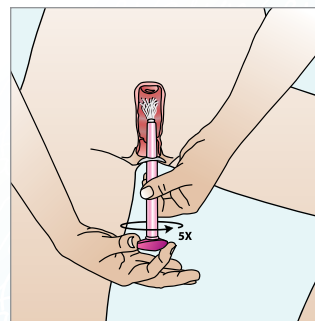


7. Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obrocie uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush.

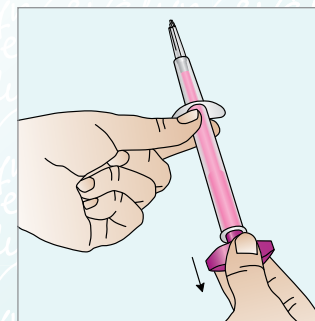


8. Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki Evalyn®Brush powyżej skrzydełek.

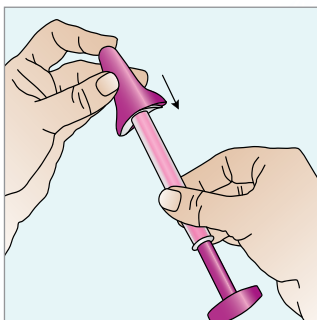


9. Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Umieść różową nasadkę z powrotem na szczoteczce Evalyn®Brush za pomocą kciuka i palca wskazującego. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.

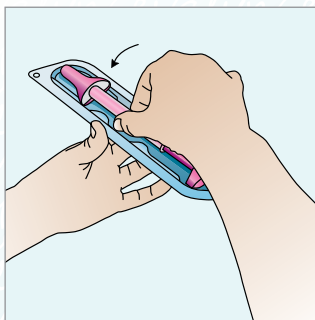

10. Umieść szczoteczkę Evalyn®Brush z powrotem w opakowaniu.

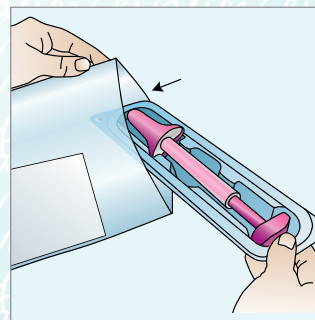

11. Umieść opakowanie zawierające szczoteczki Evalyn®Brush w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę.

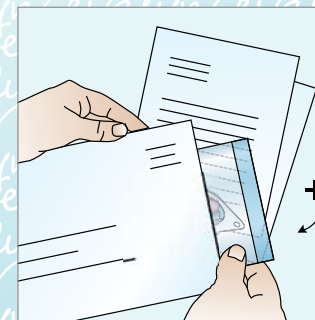

12. Użyj koperty zwrotnej w celu wysłania plastikowej torebki zawierającej szczoteczki Evalyn®Brush i wszystkich wymaganych informacji.